

Instructions pour le prélèvement d'échantillons de salive

Précautions :



Utiliser de préférence le matin à jeun



Se laver les mains



Ne pas utiliser si l'on est malade (infection)

30 minutes avant le prélèvement :



Ne pas boire



Ne pas manger



Ne pas fumer



Ne pas mâcher du chewing-gum



Ne pas porter du rouge à lèvres



Ne pas se brosser les dents




Ne pas se rincer la bouche

Instructions :

1



Crachez dans l'entonnoir jusqu'à ce que la quantité de liquide (sans bulles) atteigne 1 cm au-dessus de la ligne de remplissage.

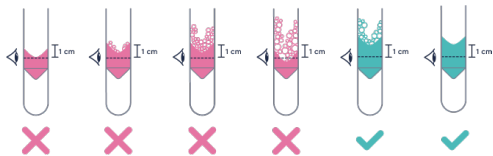

2



Tenez le tube à la verticale avec une main.

CLIC



Fermez le couvercle de l'entonnoir avec l'autre main (comme indiqué) en poussant fermement le couvercle jusqu'à ce que vous entendiez un clic sonore.



Assurez-vous que le couvercle est bien fermé. Le liquide contenu dans le couvercle sera libéré dans le tube pour se mélanger à l'échantillon.

3



Tenez le tube à la verticale. Dévissez l'entonnoir du tube.

4



Utilisez le petit bouchon pour fermer hermétiquement le tube.

5



Agitez le tube bouché pendant 5 secondes.



Jetez ou recyclez l'entonnoir.



La ligne de remplissage est également indiquée dans les précautions de collecte sur la boîte.



Lisez et suivez le mode d'emploi pour savoir comment prélever votre échantillon de salive.

Conseils pour améliorer la production de salive :

1



Massez vos joues comme indiqué. Effectuez des mouvements circulaires avec votre pouce et votre index.

2



Frottez votre langue sur le haut du palais de votre bouche.

3



Imaginez un bonbon, du citron ou votre nourriture préférée à l'intérieur de votre bouche.

Répétez ces étapes jusqu'à avoir suffisamment de salive dans votre bouche, vous pourrez ensuite procéder au prélèvement salivaire en suivant les indications mentionnées dans la notice de votre kit.